



1.クマッキング内容物一覧

クマッキングの内容物一覧です。
 商品構成によっては、右図と相違がある場合がございます。
 ご不明点はお問い合わせ下さい。

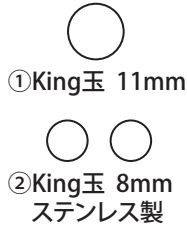


【お届け時の形状】

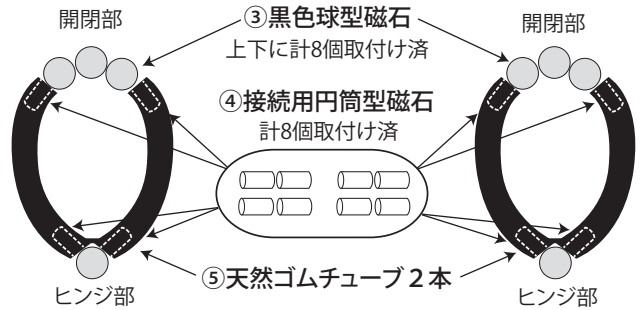

2.注意事項

△ ヒンジ部注意

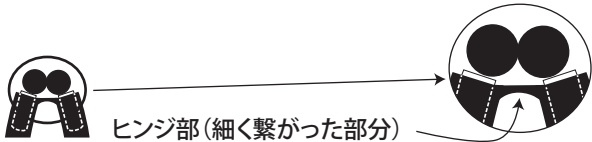

ヒンジ部(細く繋がった部分)

ヒンジ部(細く繋がった部分)は、**絶対に切断しない**で下さい!


また、ヒンジ部は、**故意に引っ張らない**で下さい。

(千切れたら効果が半減します)

△ 引っ張り厳禁

絶対にチューブをつかんで引き離さないで下さい。

チューブをつかんで引っ張るとチューブ内の接続磁石が抜けます!

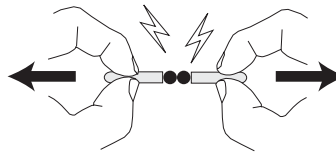

磁石を引き離す時は、本書2項『4.クマッキングの外し方』の通り、爪先を球型磁石に食い込ませ、摘み出す様に外します。

必ずこの説明書をお読みになり、良く理解されてからご使用下さい。

**△ 強力磁石
 にご注意**

ペースメーカーなど電子医療機器を装着した人は絶対に使用しないで下さい。
 また、そのような人へ磁石を近づけることは大変危険です。医療機器の正常な動作を損なう恐れがあり、医療機器装着者へ重篤な危険を招く恐れがあります。電子医療機器を装着した人へ磁石を近づけることは大変危険です。

磁気カード(クレジットカード・キャッシュカード等)、磁気テープ、プリペイドカード等の磁気記録媒体を磁石に近づけないで下さい。磁気記録媒体の記録が破壊され使用出来なくなることがあります。


磁石を飲み込まないように注意してください。窒息の危険があります。万が一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。

誤飲防止の為、お子様の手の届くところに磁石を置かないで下さい。


弊社製品をご使用によって生じた怪我や損失は、弊社では一切責任と保証を負いませんのでご了承のうえ、ご使用下さい。

- 1.商品は、大き目サイズで組み立て済みですが、万が一、使用中に外れ易い、痛い等の不具合が生じた時は磁石の増減、またはチューブを短く切断する等で調整できます。
- 2.ゴムアレルギー、金属アレルギー、磁気アレルギーの方は、使用できません。
- 3.使用前、使用後は軽く水洗いして下さい。水洗い後、よく水切りしタオル等で軽く拭き、乾いてから装着又は保管して下さい。
- 4.熱湯に漬けて消毒しないで下さい。チューブが変形し磁石が抜け易くなります。(煮沸消毒厳禁)
- 5.装着する前に、磁石がチューブの中にきちっと入っている事をその都度チェックして下さい!
- 6.クマッキングは、常温冷暗所で保管して下さい。50℃以上の高温で変形、ベタつきが生じます。
- 7.使用中に違和感、出血、腫れ、かゆみ、炎症、痛み等何らかの不都合を生じた場合は我慢せず、直ちに使用を中止し、原因を調べてください。原因不明の時は弊社へお問い合わせいただくか、専門医に相談して適切な処置を講じて下さい。

3.クマッキング開閉方法

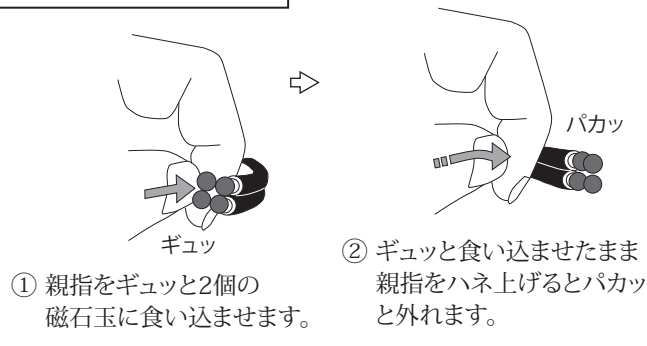

5.クマッキング水洗い方法

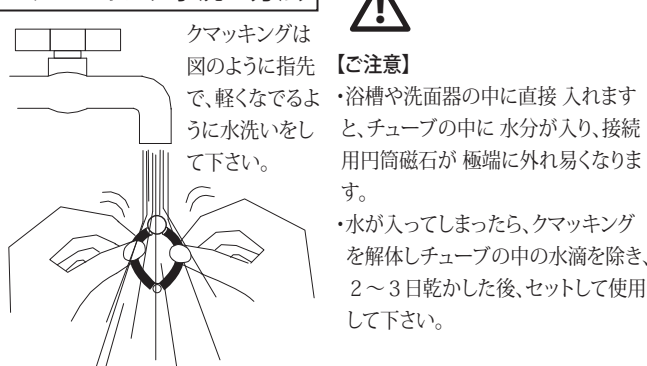


4.クマッキング装着方法

★重要★ 装着前に陰茎に付着したクリーム・粘液等はふき取して下さい。


- ① 人差し指を中に差し込んだまま ② 黒色球型磁石同士を黒色球型磁石をくっつけます。 (この手順を手抜きしますと包皮を挟み痛い思いをします)




- ③ もう一度包皮をお腹側にたぐり寄せてクマッキングの形を整え、その上からコンドームを被せ装着完了です。

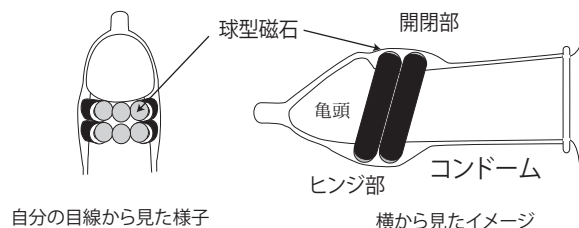


6.黒色球型磁石・King玉の使用例

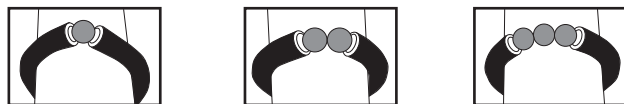

クマッキング 1 個使用時の黒色球型磁石装着例

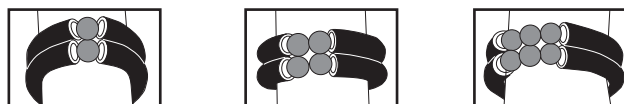


2 連装時の黒色球型磁石装着例

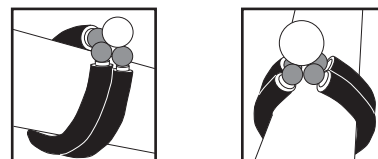

2 連装時の King 玉装着例



7.2 連装組み合わせ方

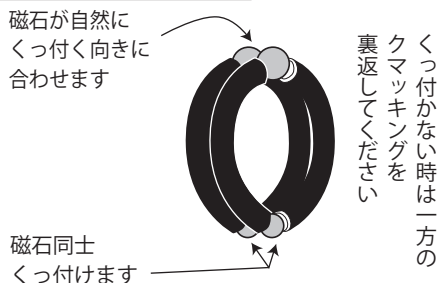

8.製品素材の表示事項

クマッキング 本体素材仕様

- ・チューブ:天然ゴム
- ・球型磁石:ネオジム磁石(表面処理:ナイロンコーティング)
- ・接続用円筒磁石:ネオジム磁石(表面処理:Niメッキ)

9.連絡先

e-メール: webmaster@kumakkey.com
 ホームページ: <http://kumakkey.com/>

製造・販売元
株式会社アイ企画

〒352-0011 TEL.048-481-9531
 埼玉県新座市野火止 5-2-13水野ビル 3階