

このたびは仮性包茎矯正・男性器増強器具「クマッキーNEO」をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。この取扱説明書はクマッキーNEO専用です。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み頂き、自分サイズにフィットするよう磁石玉で調整して下さい。又、お読みになった後は、必要な時いつでも取り出せるように保管しておくとう便利です。

クマッキーNEOは昼夜兼用24時間装着可能ですが、馴染む迄は1日2～3時間とし、徐々に延長して下さい。本製品ご使用に当たっては、自己管理・自己責任のもと、日常の手入れと使用上の注意等をお守り下さい。ホームページで装着時間の目安をご覧下さい。そして、いつも快適にご使用下さり、貴方様の心と体に「元気と感動」が漲る事を願ってやみません。

ご購入者専用「クマッキー広場」のご案内

PCはクマッキー広場検索か下記URLからログインして下さい。

<http://kumakkey.com/hiroba.htm>

パスワードは貴方以外使用厳禁。  
半角英数で入力してください。

ユーザー名:

パスワード:



クマッキー広場


検索



「クマッキー広場」で検索


新製品情報やお買い得な情報を優先的に手に入れられるメルマガ登録もクマッキー広場からどうぞ

**⚠ ゴム糸  
に注意**

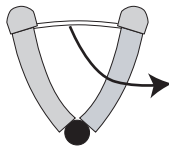

ゴム糸には、  
**絶対に爪を  
立てない**  
して下さい!

爪を立てると  
ゴム糸が破れて  
切れる事が  
あります

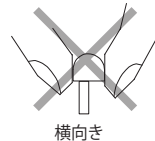

横向き




縦向き

端子は、  
**縦向きに  
摘まんで  
下さい!**

**⚠ 引っ張り厳禁**

開閉部を開く時は、**絶対にチューブを  
つかんで引き離さない**して下さい。

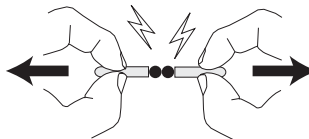

チューブをつかんで引っ張ると接続磁石が抜ける!

磁石を引き離す時は、本書2項『3、クマッキーNEOの外し方』の通り、爪先を球型磁石に食い込ませ、摘み出す様に外します。

1.初めてお使いになられる方へ

**⚠ 強力磁石にご注意**

必ずこの説明書をお読みにになり、  
良く理解されてからご使用下さい。

ペースメーカーなど電子医療機器を装着した人は絶対に使用しないで下さい。また、そのような人へ磁石を近づけることは大変危険です。医療機器の正常な動作を損なう恐れがあり、医療機器装着者へ重篤な危険を招く恐れがあります。電子医療機器を装着した人へ磁石を近づけることは大変危険です。

磁気カード(クレジットカード・キャッシュカード等)、磁気テープ、プリペイドカード等の磁気記録媒体を磁石に近づけないで下さい。磁気記録媒体の記録が破壊され使用出来なくなることがあります。

磁石を飲み込まないように注意して下さい。窒息の危険があります。万が一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。誤飲防止の為、お子様の手の届くところに磁石を置かないで下さい。

弊社製品をご使用によって生じた怪我や損失は、弊社では一切責任と保証を負いませんのでご了承のうえ、ご使用下さい。

- 1.商品は、大き目サイズで組み立て済みですが、使用中に外れ易い、痛い等の不具合が生じた時は磁石の増減、またはチューブを短く切断する等で調整できます。(2ページ、3ページ参照)
- 2.商品を調整しても、頻繁に外れる場合は無償にて調整致しますので、ご連絡下さい。(購入後100日以内有効)
- 3.ご使用中に本品を紛失されても保証制度はありませんので、紛失しないようにお使い下さい。なお、ストラップセット売り、または別売りの紛失防止ストラップのご使用をお勧め致します。
- 4.勃起時にクマッキーNEOの装着はしないで下さい。また、取り外しは極力萎縮時に行ってください。

## 2.クマッキーNEO装着方法






この方法以外で着脱すれば裏筋を挟み非常に痛い思いをします。

平常時に装着のこと


勃起時厳禁

図のようにクマッキーのゴム糸を亀頭のカリ部分に引っかけ、左手中指を亀頭の下に持ってきて包皮を挟まないよう中指ごと球磁石の磁力で巻き付ける。

左手中指を中指ごと球磁石の磁力で巻き付ける。

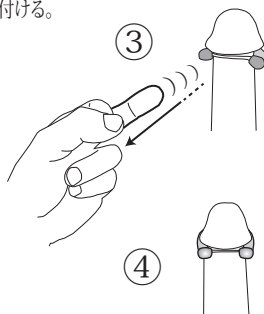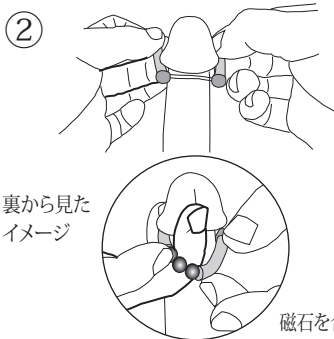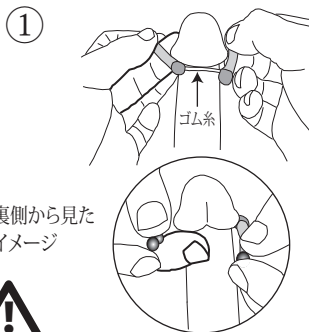

球磁石に巻き付けた中指をペニスから引き抜く。

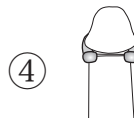

包皮をお腹側にたぐり寄せてクマッキーの形を整え装着完了

磁石を合わせる。

サポートサイトで確認する。↓


**ペニスと磁石の間に必ず中指を挟んで下さい!** もし、中指を挟まないで直接装着しようとするれば磁石と磁石が裏筋等を挟み激痛に襲われます。万が一そうなっても当方は一切の責任を持ってません。



## 3.クマッキーNEO外し方


勃起時厳禁

必ず平常時に外すこと

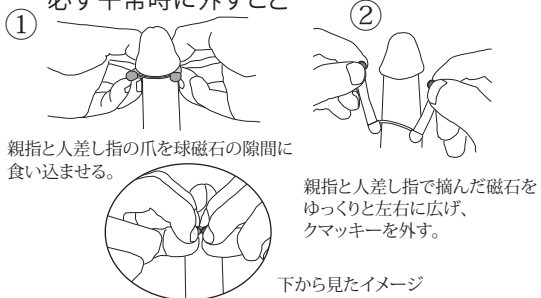


## 4.落下防止ストラップ使用方法

オプション(別売)品

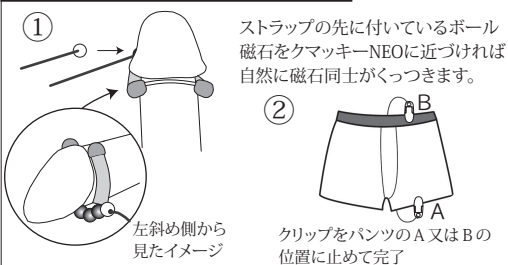

注意: B位置で使用する場合、ベルト等で強くクリップを圧迫しないで下さい。クリップが破損する場合がございます。


クリップの開き方

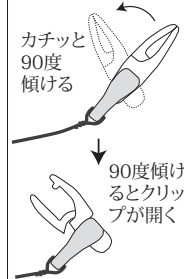

## 5.クマッキーNEOへ円柱磁石(別売)のセット方法

① ② ③  
磁石→ゴム糸→端子の順に入れる

磁極は磁石の横側にあり、チューブに入れると、中で自然に左右の磁石はN Sが向かい合います。磁石を取り出す場合はクリップ等を伸ばしチューブに差し込みゆっくりと引き抜きます。

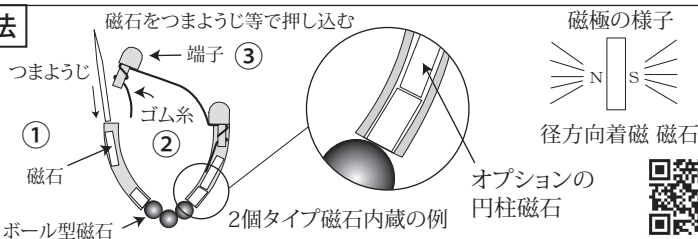

<http://kumakkey.com/m/03mov.htm> 動画で確認


## 6.クマッキーNEOサイズ調整方法

接続部のボール磁石数を増減するだけでサイズの調整が可能です。従来のクマッキーのように、ゴム糸やチューブの長さをお客様ご自身で調整しないで下さい。


クマッキーが大きい場合  
(磁石を減らす)

ご購入時標準状態


ボール型磁石が3個でクマッキーNEOが小さい場合は弊社までご相談ください。  
TEL 048-481-9531  
webmaster@kumakkey.com

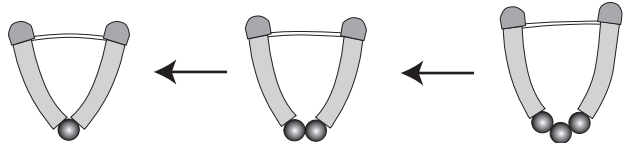

## 7.クマッキーNEOがペニスから外れないようにするには

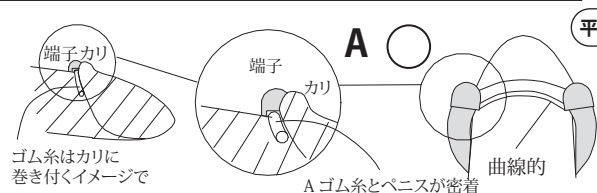

平常時のイメージ

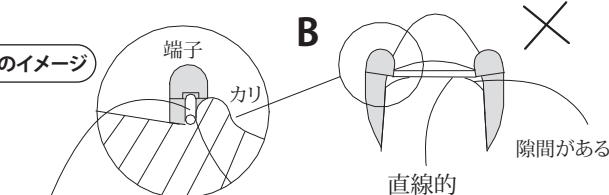

A・平常時でもゴム糸が、カリにしっかりと引っ掛かる事が絶対条件です。

B・平常時ゴム糸がペニスから浮いてるとカリに引っ掛かりにくいので外れます。この場合はクマッキーNEOを少し小さくすることで解決します。


## 8.水洗い方法

クマッキーは図のように端子を下向きにし、指先で、軽くなでるように水洗いして下さい。



### 【ご注意】

- ・浴槽や洗面器の中に直接 入れますと、チューブの中に 水分が入り、ゴム糸や端子が極端に外れ易くなります。
- ・水が入ってしまったら、クマッキーNEOを解体し、チューブの中の水滴を除き、2～3日乾かした後、セットして使用して下さい。

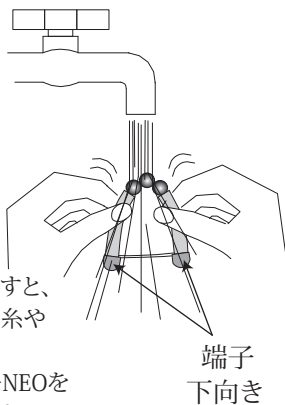


端子  
下向き

## 9.トイレの仕方

<http://kumakkey.com/m/07mov.htm>



動画で確認

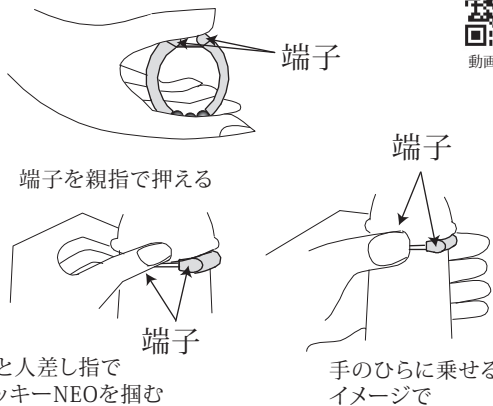

親指と人差し指で  
クマッキーNEOを掴む

手のひらに乗せる  
イメージで

## 10.包皮の長い方 & ムキ癖を早く付けたい方へご案内

包皮の長い中度以上の仮性包茎の方でも以下の方法で包皮をせき止めることができます。※何れの方でも、経験上クマッキー2連装着はムキ癖の付き方が速まる傾向にあります。

包皮の長い方 2連装着 3例 【参考】バネ入りチューブ

【参考図】プレミアム端子構成図



バネなしチューブに端子を付け2連装着すると、隙間が無く使い勝手も良くバネのスペースに磁石も多く入る




バネなしチューブ:4個1セット 500円



プレミアム端子のゴム糸は端子足から出ていますが、バネなしチューブ専用プレミアム端子のゴム糸は端子頭からゴム糸が出ています。

バネなしチューブ専用プレミアム端子

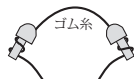

バネなしチューブ


平常時のペニス幅サイズが3.5cm以上の方は磁石が多く入るバネなしチューブクマッキーを単品で使用できます。

バネなしチューブ+プレミアム端子セット(磁石無):1700円  
バネなしチューブ+プレミアム端子セット+磁石6個:3200円

<http://kumakkey.com/m/08mov.html>

包皮の長い方:端子キャップ

端子に端子キャップを被せると、端子の高さが高くなり、長い包皮でも、せき止める事ができます。

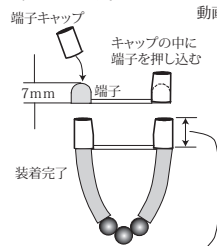

10mmと15mmがあります。  
端子キャップ:5個入り1セット 500円

仮性包茎器具矯正器具「クマッキーNEO」は、仮性包茎の包皮をムイタ状態で、男性器に装着し外的刺激等により亀頭に成長を促しつつ、包皮にムキ癖をつけさせ、仮性包茎を矯正する器具です。

- ・ムキ癖が付くまでの期間及び程度は仮性包茎の度合い、年齢等により個人差があります。
- ・尚、年齢・包茎の程度・体質等によってはムキ癖が付き難い場合も有りますので予めご了承下さい。

## 11.使用禁止事項

- 1.「クマッキーNEO」は亀頭部を無理なく露出できる方の専用商品です。カントン、真性包茎には使用できません。また、ペニスに急性または慢性の炎症を起こしている時は使用できません。
- 2.ゴムアレルギー、金属アレルギー、磁気アレルギーの方は、使用できません。
- 3.S E X用具には絶対使用しないで下さい。

## 12.日常の手入れ

- 1.毎日軽く水洗いして下さい。水洗い後、よく水切りシタオル等で軽く拭き、乾いてから装着して下さい。
- 2.熱湯に漬けて消毒しないで下さい。チューブが変形し磁石が抜け易くなります。(煮沸消毒厳禁)
- 3.装着する前に、磁石がチューブの中にきちっと入っている事をその都度チェックして下さい。

3ページ

8 参照

## 13.製品取り扱い上のご注意

- 1.クマッキーNEOは、常温冷暗所で保管して下さい。50℃以上の高温で変形、ベタつきが生じます。
- 2.調整後でも1日1回以上、ペニスから外れる場合は調整不良ですので、2ページ6を参照して再度調整してください。きちんと調整できていれば、ほとんど外れませんが調整が難しい方はお気軽にご連絡ください。
- 3.チューブ等部品が消耗、紛失、破損の場合、部品のみの購入も出来ます。ご利用ください。

### 13.製品取り扱い上のご注意の続き

4.洗濯機で洗わないで下さい。破損します。 5.砂場等に落とさないで下さい。砂鉄が付着します。

### ! 14.使用上の注意事項

- 1.本品を装着し、しばらくしますと、たぐり寄せた包皮がクマッキーNEOにせき止められ水膨れのようになります。これは、ムキ癖となるシワが形成される初期段階です。痛み、違和感等が無い場合は、そのまま使用しても差し支えありません。なお、異常と思える場合は、使用を一時中止し、症状の改善を図ってください。数日経っても改善しない場合は専門医に相談して下さい。
- 2.使用中に違和感、出血、腫れ、かゆみ、炎症、痛み等何らかの不都合を生じた場合は我慢せず、直ちに使用を中止し、原因を調べてください。原因不明の時は下記にお問い合わせになるか、専門医に相談して適切な処置を講じて下さい。
- 3.常時装着する事で包皮にシワが増え、ムキ癖が付いてきますので、気長に使用して下さい。
- 4.本品を装着しないでも亀頭の露出が持続するようになれば、矯正完了です。詳細はHPで確認できます。

### 15.製品素材の表示事項

「クマッキーNEO」は日本国内で安全清潔管理体制のもと製造しています。

#### クマッキーNEO:

- ・チューブ:天然ゴム
- ・端子:エラストマー樹脂
- ・ボール型磁石:ネオジム磁石※中国製
- ・端子の足:ABS樹脂
- ・ゴム糸:シリコン樹脂

#### 磁石仕様:

- ・材質:ネオジム磁石
- ・着磁方向:径方向着磁
- ・表面処理:Niメッキ

## メールマガジン会員募集中

「メルマガ会員様だけ」に  
いち早く最新サポート情報や、限定特典をお知らせします。

### 特典1

クマッキーのサポート  
や会員様限定無料や  
格安モニター情報

クマッキー製品サポート情報や会員  
様だけ募集の新製品無料モニター  
募集情報をいち早くお知らせします。

### 特典2

男性器増大鍛錬法や  
包茎に関する情報を  
無償公開

有料販売している男性器増大鍛錬  
法やEDに関する情報や包茎に関  
する情報を無償提供しています。

メルマガ登録は下記の  
メールアドレスへタイトル、  
本文なしの空メール  
を送るだけで登録完了

reg@kumakkey.com

スマホの方は右記のQR  
コードからも登録可です



クマッキー商品に関するお問い合わせ、ご注文、ご質問、ご相談、ご意見等は、下記URLホームページの  
ご購入者専用ページからアクセスするか、下記へ直接、Eメール、FAX、お手紙等でご連絡下さい。

(お断り)製品の価格・仕様等は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

製造・販売元

株式会社アイ企画

TEL.048-481-9531  
〒352-0011 埼玉県新座市野火止5-2-13水野ビル3階 FAX.048-481-9239  
e-メール: webmaster@kumakkey.com ホームページ: http://www.kumakkey.com/

