


このたびは仮性包茎矯正・男性器増強器具「ゴールドクマッキー」をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。


ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み頂き、お読みになった後も、必要な時いつでも取り出せるように保管しておいて下さい。ゴールドクマッキーは昼夜兼用24時間装着可能ですが、馴染む迄は1日2～3時間から徐々に延長して下さい。下記「クマッキー広場」で装着時間の目安もご覧下さい。

本品は、自己管理・自己責任のもと、日常の手入れと使用上の注意をお守り頂き、いつも快適にご使用下さい。

⚠ 開閉時 チューブ引っ張り厳禁

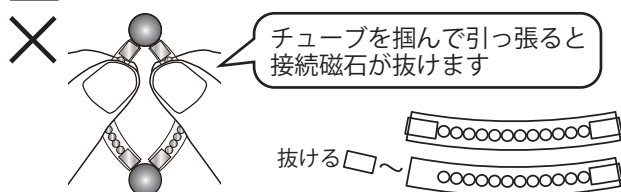

➡ 接続磁石を掴んで引き離してください

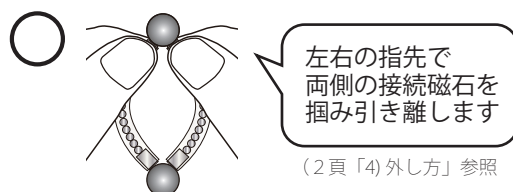

(2頁「4」外し方) 参照

1) 初めてお使いになられる方へ

⚠ 強力磁石にご注意

必ずこの説明書をお読みになり、良く理解してからご使用下さい。

ペースメーカーなど **電子医療機器** を装着した人は絶対に使用しないで下さい。また、そのような人へ磁石を近づけることは大変危険です。医療機器の正常な動作を損なう恐れがあり、医療機器装着者へ重篤な危険を招く恐れがあります。電子医療機器を装着した人へ磁石を近づけることは大変危険です。

磁気カード(クレジットカード・キャッシュカード等)、磁気テープ、プリペイドカード等の磁気記録媒体を磁石に近づけないで下さい。磁気記録媒体の記録が破壊され使用出来なくなることがあります。


磁石を飲み込まないように注意してください。窒息の危険があります。万が一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。誤飲防止の為、お子様の手の届くところに磁石を置かないで下さい。

弊社製品によって生じた怪我や損失等は、弊社では一切責任と保証を負いませんのでご了承のうえ、ご使用下さい。

1. 商品は、大き目サイズで組み立て済みですが、使用中に外れ易い、痛い等の不具合が生じた時は磁石の増減、またはチューブを短く切断する等で調整できます。(2ページ、3ページ参照)
2. 商品を調整しても、頻繁に外れる場合は無償にて調整致しますので、ご連絡下さい。(購入後180日以内有効)
3. ご使用中に本品を紛失されても保証制度はありませんので、紛失しないようお使い下さい。なお、ストラップセット売り、または別売りの紛失防止ストラップのご使用をお勧め致します。

2) ゴールドクマッキーパーツ一覧

【本体】Z玉(大) 11mm(ゴールド) 2個 付属

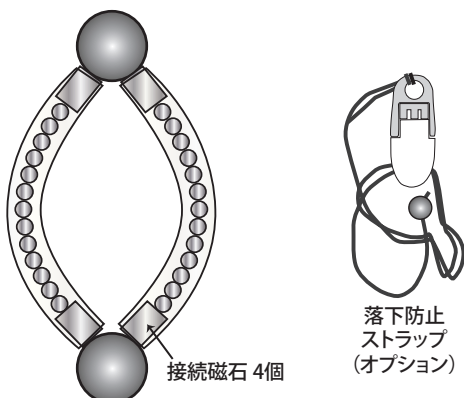

ご購入者専用「クマッキー広場」のご案内

PCはクマッキー広場検索か下記URLからログインして下さい。

<http://kumakkey.com/hiroba.htm>

パスワードは貴方以外使用厳禁。

半角英数で入力してください。

ユーザー名:

パスワード:



クマッキー広場に収録されている内容

- ・装着時間の目安
- ・取扱説明書最新版
- ・商品に関するQ & A
- ・各種保証等申し出
- ・ペニス増大トレーニング法(動画)
- ・クマッキーパーツ類購入
- ・クマッキー会員登録フォーム



クマッキー使用方法
動画解説はこちら

サイズ調整・返品交換
不具合申し出、その他
ご質問ご要望はこちら



3) ゴールドクマッキー装着方法

萎縮時に装着して下さい Z玉をくっ付ける時に包皮を挟まないよう注意

① 図のように包皮を指でお腹側にたぐり寄せます。

② 両手の親指と人差し指でクマッキー先端をつかみ、Z玉側人差し指をゴールドクマッキーの中に差し込みます。

③ 人差し指を中に差し込んだままZ玉をくっつけます。

④ Z玉にクマッキー先端をゆっくりと付けます。

⑤ もう一度包皮をお腹側にたぐり寄せてクマッキーの形を整え装着完了です。

Z玉の取り付け位置について

- ・包皮の長い方はZ玉の位置を⑤図のように上部(裏筋と反対側)にあてがって下さい。
- ・包皮の長くない方は、Z玉は上側でも裏筋側でもお好みにより実施してください。
(裏筋側の場合、装着時に裏筋の挟み込みに十分注意!! 挟んだら死ぬ程痛いです!)

装着完了図

自分の目線から見た様子

カチッ

★人差し指はくっ付けた後に引き抜く


ストラップ

4) ゴールドクマッキー外し方

この方法以外禁止



- ① 親指と人差し指の爪先を磁石接続部に食い込ませ摘み出すように引き離す。
- ② 親指と人差し指で球型磁石をつまみ、ゆっくりと左右に広げ、クマッキーを外します。

親指と人差し指の腹でチューブを掴む。

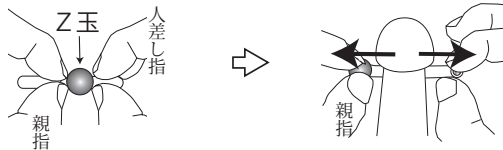

上記以外の方法で取り外しは厳禁です!!

5) ストラップ磁石の取り付け位置

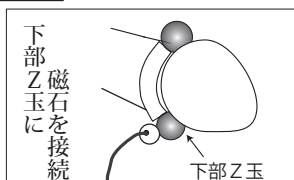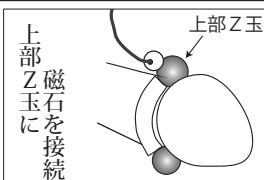

6) ストラップの使い方

- ① ストラップ紐先端的磁石をクマッキーのZ玉に付けます。



- ② クリップをパンツのA又はBの位置に止めて完了です。

注意: B位置固定はベルト等で強く圧迫するとクリップが破損する恐れがあります。




クリップの開き方

カチッと90度傾けます 90度傾けるとクリップが開きます



7) 水洗い方法

図のように指先で軽くなでるように水洗いを毎日して下さい。

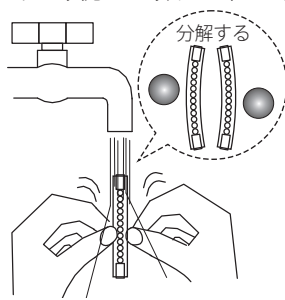

・浴槽や洗面器の中に直接入れて洗うことも可能です。

【ご注意】

- ・水中に長時間入れない
- ・熱いお湯に入れない。磁石の極度の劣化や、水分の浸透で使用できなくなる場合があります。

日常の手入れ

1. 毎日軽く水洗いして下さい。水洗い後、よく水切りしタオル等で軽く拭き、乾いてから装着して下さい。
2. 熱湯で消毒しないで下さい。磁石の磁力が極度に劣化し使えなくなります。(煮沸消毒厳禁)
3. 装着する前に、磁石がチューブの中にきちっと入っている事をその都度チェックして下さい。

2 ページ

7 参照

仮性包茎矯正器具「ゴールドクマッキー」は、仮性包茎の包皮をムイタ状態で、男性器に装着し、亀頭に外的刺激を与えつつ、包皮が亀頭に被さるのを阻止するストッパーです。

- ・ムキ癖が付く事もありますが付くまでの期間及び程度は仮性包茎の度合い、年齢等により個人差があります。
- ・尚、年齢・包茎の程度・体質等によってはムキ癖が付き難い場合もありますので予めご了承下さい。

製品素材の表示事項

「ゴールドクマッキー」は日本国内で安全清潔管理体制のもと製造・検査しております。

本体素材仕様:



- ・チューブ: シリコン
- ・接続用円筒磁石: ネオジウム磁石(表面処理: Niメッキ)※中国製
- ・(ZII)鉄球・鉄棒: 鉄

磁石仕様:



- ・材質: ネオジウム磁石
- ・着磁方向: 径方向着磁
- ・表面処理: Niメッキ

8) 2連装基本型組立

ゴールドクマッキーを2連装する為にZ玉(大)とZ玉(小)を入れ替えて組み立てます

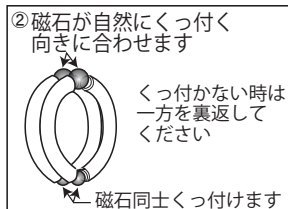
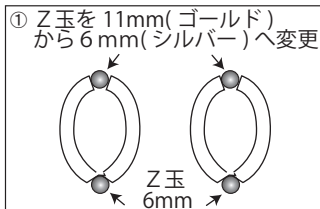


2連装装着方法

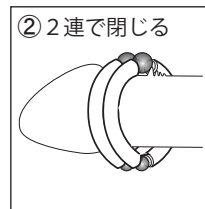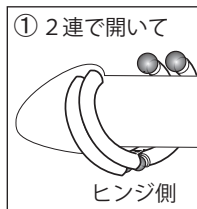

9) 2連装、3連装のメリット


連装のメリット その1 包皮をせき止める位置が根元に来ます!!

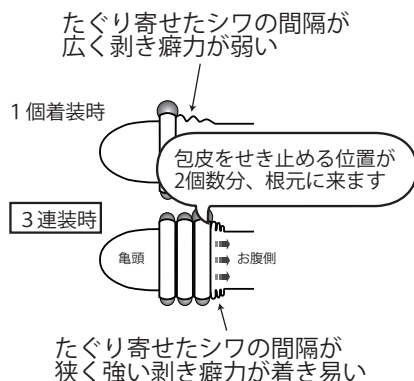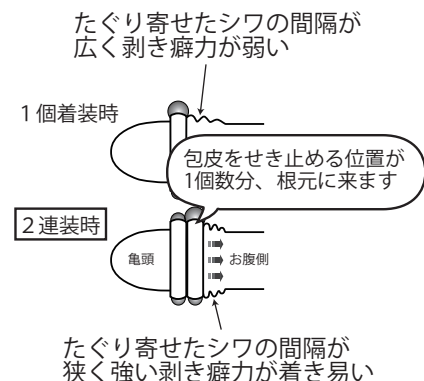

ゴールドクマッキーは、連装することにより、包皮をせき止める位置が根元に来て、包皮の戻りを抑止する力が強まります。1個着用時よりも、2連装の方が強力で、包皮にシワを寄せる力が增加します。

連装のメリットその2

2～3倍の重量で確かな装着感!!

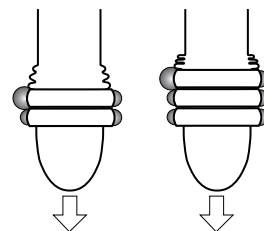

連装着すれば、重量感と牽引感が重なり男性器に程良い刺激をもたらします。

連装のメリットその3

2～3連装着すれば、マグネットパワーも増加します。

10) 使用禁止事項

- 1.「ゴールドクマッキー」は龟头部を無理なく露出できる方の専用商品です。カントン、真性包茎には使用できません。また、ペニスに急性または慢性の炎症を起こしている時は使用できません。
- 2.ゴムアレルギー、金属アレルギー、磁気アレルギーの方は、使用できません。
3. S E X 用具には絶対使用しないで下さい。

11) 製品取り扱い上のご注意とお願い

- 1.使用中に違和感、出血、腫れ、かゆみ、炎症、痛み等何らかの不具合を生じた場合は、直ちに使用を中止し、原因を調べて下さい。原因不明の時は下記にお問い合わせいただくか、専門医に相談して適切な処置を講じて下さい。
- 2.本品を装着し、しばらくしますと、たぐり寄せた包皮がゴールドクマッキーにせき止められ水膨れのようなことがあります。これは、一般的にムキ癖となるシワが形成される初期段階と考えられます。痛み、違和感等が無い場合は、そのまま使用しても差し支えありません。なお、異常と思える場合は、使用を一時中止し、症状の改善を図ってください。数日経っても改善しない場合は専門医に相談して下さい。
- 3.ご使用に当たりサイズが大きい、小さい等不具合の場合は適正なサイズと交換致しますのでご連絡ください。
【ご連絡先】 https://otk1.net/q_kk_size.html
- 4.ゴールドクマッキーは、常温冷暗所で保管して下さい。変色や、高温により磁力に劣化が生じる場合があります。
- 5.地面や砂場等に落とさないよう気を付けてください。砂鉄が付着します。
- 6.チューブ等部品が消耗、紛失、破損の場合、部品のみの購入も出来ます。ご利用ください。

ゴールドクマッキー商品に関するお問い合わせ、ご注文、ご質問、ご相談、ご意見等は、下記URLホームページのご購入者専用ページからアクセスするか、下記へ直接、Eメール、FAX、お手紙等でご連絡下さい。

(お断り)製品の価格・仕様等は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。



製造・販売元
株式会社アイ企画

〒352-0011

埼玉県新座市野火止 5-2-13新座かけはしビル 3階

eメール: webmaster@kumakkey.com

ホームページ: <http://www.kumakkey.com/>

TEL.048-481-9531

FAX.048-481-9239