

このたびは「クマッキーアロマ」をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。この取扱説明書はクマッキーアロマ専用です。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み頂き、必要な時いつでも取り出せるように保管しておいて下さい。最新版、クマッキーアロマ取説は下記「クマッキー広場」からもダウンロード出来ます。
クマッキーアロマは馴染む迄は1日2～3時間から徐々に延長して下さい。
本製品ご使用に当たっては、自己管理・自己責任のもと、日常の手入れと使用上の注意等をお守り下さい。そして、いつも快適にご使用下さり、貴方様の心と体に「元氣と感動」が漲る事を願ってやみません。

ご購入者専用「クマッキー広場」のご案内 クマッキー広場検索か下記URLまたはQRコードからログインして下さい。

クマッキー広場

検索

カチ

<http://kumakkey.com/hiroba.htm>

ユーザー名:

パスワード:

「クマッキー広場」で検索

パスワードは貴方以外使用厳禁。


半角英数で入力してください。

⚠️ ヒンジ部注意




ヒンジ部(細く繋がった部分)は、絶対に切断しないで下さい!また、ヒンジ部は、故意に引っ張らないで下さい。(千切れて使い物にならなくなります)

⚠️ チューブ引っ張り厳禁

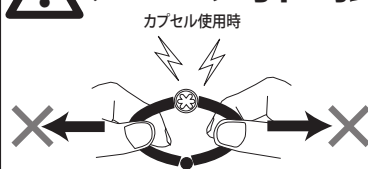

カプセル使用時は右図のように親指の爪をカプセルに食い込ませて外して下さい

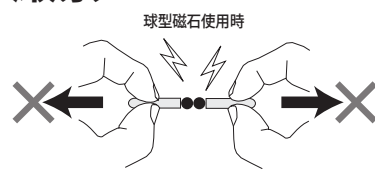

球型磁石使用時は右図のように人差し指と親指の爪を球型磁石に食い込ませて外して下さい

球型磁石

⚠️ 強力磁石注意



ペースメーカーなど電子医療機器を装着した人は絶対に使用しないで下さい。また、そのような人へ磁石を近づけることは大変危険です。医療機器の正常な動作を損なう恐れがあり、医療機器装着者へ重篤な危険を招く恐れがあります。



磁気カード(クレジットカード・キャッシュカード等)、磁気テープ、プリペイドカード等の磁気記録媒体やスマートフォンや時計等の精密機器を磁石に近づけないで下さい。磁気記録媒体の記録が破壊されたり、精密機器の機能が正常に使用出来なくなることがあります。



誤飲防止の為、お子様の手の届くところに磁石を置かないで下さい。窒息の危険があります。万が一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。


弊社製品をご使用によって生じた怪我や損失は、弊社では一切責任と保証を負いませんのでご了承のうえ、ご使用下さい。

1. 商品は、大き目サイズで組み立て済みですが、使用中に外れ易い、痛い等の不具合が生じた時は磁石の増減、またはチューブを短く切断する等で調整できます。(2ページ、3ページ参照)
2. 商品を調整しても、頻繁に外れる場合は無償にて調整致しますので、ご連絡下さい。(購入後100日以内有効)
3. ご使用中に本品を紛失されても保証制度はありませんので、必ず落下防止ストラップをお使いになり、紛失しないようにご注意下さい。
4. 着脱は必ず萎縮時に行ってください。

1.クマッキーアロマパーツ一覧

商品構成によっては、下図と相違がある場合がございます。ご不明点はお問い合わせ下さい。

組立済みクマッキーアロマ (Wiはチューブ2本、Siは1本付属)

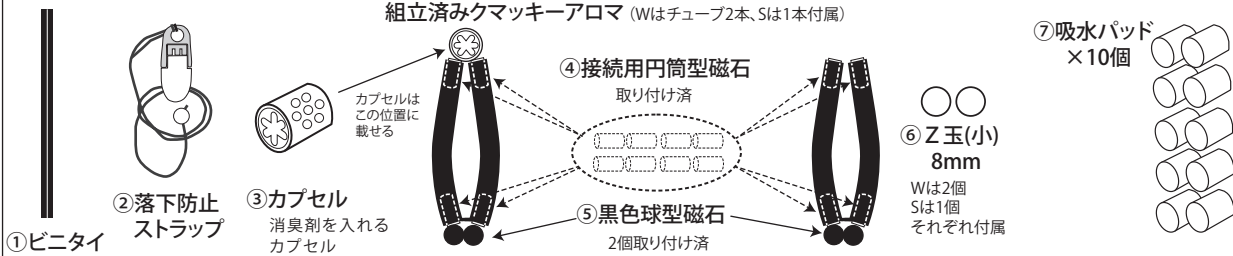


2.カプセルについて




3.クマッキーアロマ装着方法【萎縮時に装着して下さい】

勃起時厳禁

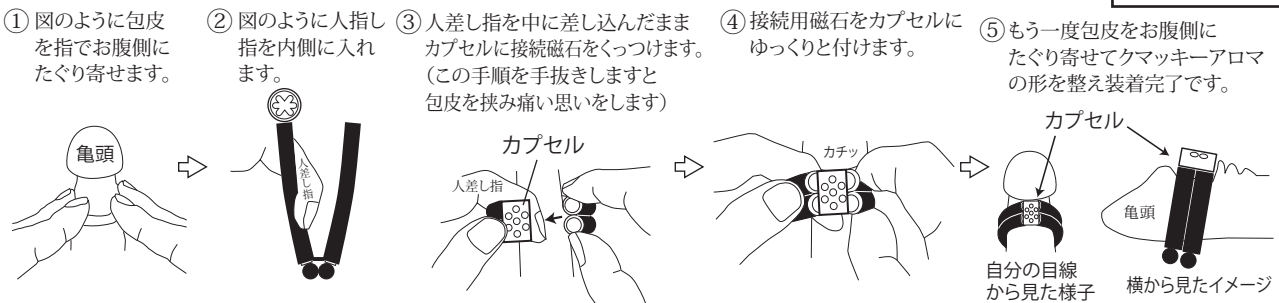

4.クマッキーアロマ外し方【萎縮時に行って下さい】

球形磁石2個の場合の外し方

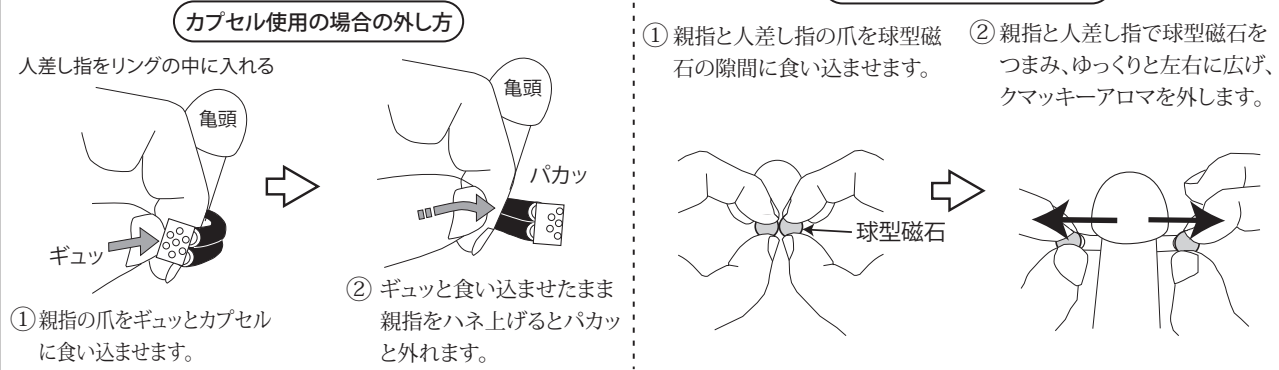

5.消臭芳香剤の入れ方

消臭芳香剤入れ方(液体タイプの場合)


吸水パッド外し方

消臭芳香剤入れ方(顆粒タイプの場合)

- ① 吸水パッドをカプセルに入れます。
- ② 吸水パッド上に消臭芳香液を5~6滴垂らします。
- ③ 消臭芳香液を垂らしたら蓋に硬貨を差し込み蓋をします。

- ① 爪楊枝等を吸水パッドに差し込みます。
- ② 爪楊枝をゆっくり引き抜きます。

- ① 顆粒を直接カプセル内に入れます。
- ② 顆粒を入れたら蓋に硬貨を差し込み蓋をします。

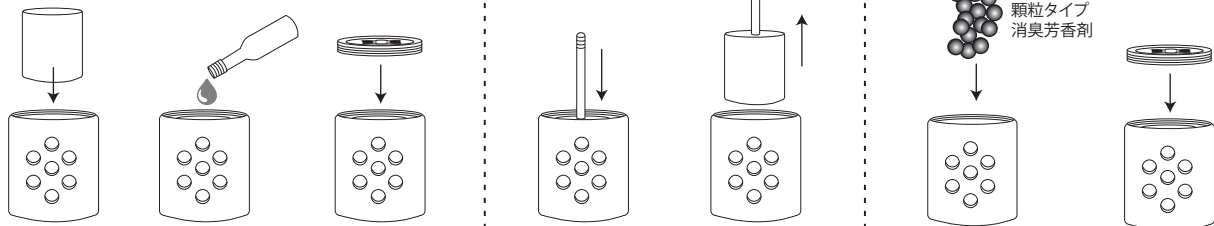

6. チューブ内の空気が抜けた時の対処法

①稀にチューブ内の空気が抜けてヘコミが出来る場合があります。

②接続用円筒磁石を引き抜きチューブ内に空気を入れます。

③チューブ内に自然に空気が入りチューブも復元します。

④円筒磁石を磁極に注意しながら元にはめ込みます。

チューブ内の空気が抜けたらクッション性が半減します。

外す
ヘコミ
引き抜く
接続用円筒磁石
空気が入る
復元する
接続用円筒磁石
磁極に注意し、はめ込む

7. Z玉と磁石の組み合わせについて

ペニスへのホールド方法は3種類に変更できます。ご自身のペニスに合わせて一番良い組み合わせをお試し下さい。

萎縮時と勃起時のサイズの差が大きい人にお勧め

カプセル



ヒンジ部
黒色球
磁石2個
真横から見た図

萎縮時と勃起時のサイズの差が小さい人にお勧め

カプセル



ヒンジ部
Z玉(小)
8mm
真横から見た図


カプセル



ヒンジ部
黒色球
磁石1個
真横から見た図


8. ストラップの使い方

- ①ストラップの先に付いている球型磁石をクマッキーアロマに近づければ自然に磁石同士がくっつきます。
- ②クリップをパンツのA又はBの位置に止めて完了です。

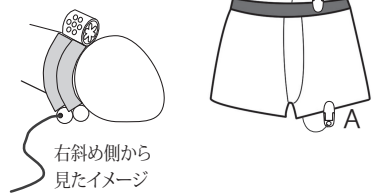

右斜め側から見たイメージ

注意: B位置で使用する場合、ベルト等で強くクリップを圧迫しないで下さい。クリップが破損する場合がございます。

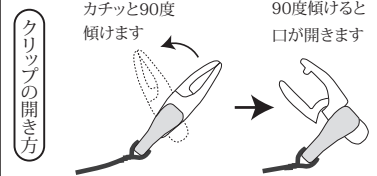

9. 水洗い方法【カプセルは外して下さい】

クマッキーアロマは図のようにカプセルを外しチューブのみ指先で、軽くなでるように水洗いを毎日して下さい。

カプセルはウェットティッシュ又は濡れた布などで表面を拭いてお手入れして下さい。


【ご注意】

- ・浴槽や洗面器の中に直接入れますと、チューブの中に水分が入り、接続用円筒磁石が極端に外れ易くなります。
- ・水が入ってしまったら、円筒磁石を外しチューブの中の水滴を除き、2～3日乾かした後、セットして使用して下さい。


10. 3連装着について

3連組立イメージ

2連装着で包皮がクマッキーアロマを乗り越えてしまう場合、追加でクマッキーZを1個買い足して3連装にする方法もあります。

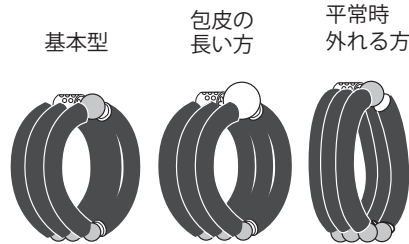

くっ付かない時は一方のクマッキーアロマを裏返して下さい

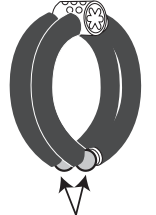

磁石が自然にくっつく向きに合わせます

11. チューブのサイズ調整


お届けの組立済クマッキーアロマが大きい場合のみ実施して下さい。

- ① 付属のピンタイを勃起した亀頭直下にぐるりと一巻きした所で折り曲げます。
- 勃起状態
ピンタイを折り曲げます
- ② 折り曲げた所を強く押し付け固定します。更に1cm折り曲げる。
- 調整後の長さ


- ③ 調整後の長さのピンタイを真ん中で半分に折り曲げます。



- ④ チューブのヒンジ側を揃え、切断箇所にボールペン等で印を付けます。

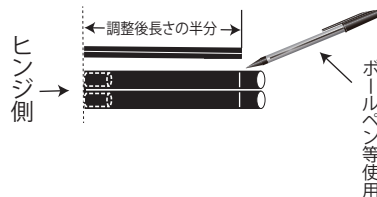

- ⑤ チューブをハサミの根元迄差し込み印の所を1本ずつゆっくり切断します。

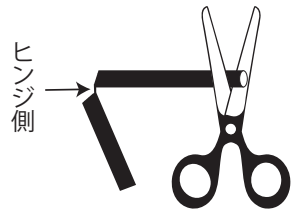

記録しましょう

自分のカリ首円周サイズ(.)cm

消臭・仮性包茎矯正器具「クマッキーアロマ」は、仮性包茎の包皮をムイタ状態で男性器に装着し、ペニスの臭いをカプセルに入った消臭芳香剤で消臭し、更に外的刺激等により亀頭に成長を促しつつ、包皮にムキ癖をつけさせ、仮性包茎も矯正する器具です。

- ・ムキ癖が付くまでの期間及び程度は仮性包茎の度合い、年齢等により個人差があります。
- ・尚、年齢・包茎の程度・体質等によってはムキ癖が付き難い場合もありますので予めご了承下さい。

! 11.使用禁止事項

- 1.「クマッキーアロマ」は亀頭部を無理なく露出できる方の専用商品です。カントン、真性包茎には使用できません。また、ペニスに急性または慢性の炎症を起こしている時は使用できません。
- 2.ゴムアレルギー、金属アレルギー、磁気アレルギーの方は、使用できません。
3. S E X 用具には絶対使用しないで下さい。この商品はアダルト商品ではありません。

! 12.日常の手入れ

- 1.毎日軽く水洗いして下さい。水洗い後、よく水切りタオル等で軽く拭き、乾いてから装着して下さい。 2 ページ
- 2.熱湯に漬けて消毒しないで下さい。チューブが変形し磁石が抜け易くなります。(煮沸消毒厳禁) 8 参照
- 3.装着する前に、磁石がチューブの中にきちっと入っている事をその都度チェックして下さい。

! 13.製品取り扱い上のご注意

- 1.クマッキーアロマは、常温冷暗所で保管して下さい。50℃以上の高温に放置しますと変形、ベタつきが生じます。
- 2.調整後でも1日1回以上、ペニスから外れる場合は調整不良ですので、2 ページ6を参照して再度調整して下さい。きちんと調整できていれば、ほとんど外れませんが調整が難しい方はお気軽に下記へご連絡ください。
- 3.チューブ等部品が消耗、紛失、破損の場合、部品のみご購入も下記から出来ます。ご利用ください。
- 4.洗濯機で洗わないで下さい。破損します。 5.砂場等に落とさないで下さい。砂鉄が付着します。

! 14.使用上の注意事項

- 1.本品を装着し、しばらくしますと、たぐり寄せた包皮がクマッキーアロマにせき止められ水膨れのようになることがあります。これは、ムキ癖となるシワが形成される初期段階です。痛み、違和感等が無い場合は、そのまま使用しても差し支えありません。なお、異常と思える場合は、使用を一時中止し、症状の改善を図ってください。数日経っても改善しない場合は専門医に相談して下さい。
- 2.使用中に違和感、出血、腫れ、かゆみ、炎症、痛み等何らかの不都合を生じた場合は我慢せず、直ちに使用を中止し、原因を調べて、原因不明の時は下記にお問い合わせいただくか、専門医に相談して適切な処置を講じて下さい。
- 3.外出や激しい運動等を行う際は、紛失防止ストラップを使用して下さい。

15.製品素材の表示事項

「クマッキーアロマ」は日本国内で安全清潔管理体制のもと製造しています。

クマッキーアロマ 本体素材仕様:

- ・チューブ:天然ゴム
- ・球形磁石:ネオジウム磁石(表面処理:ナイロンコーティング)※中国製
- ・接続用円筒磁石:ネオジウム磁石(表面処理:Niメッキ)※中国製

磁石仕様:

- ・材質:ネオジウム磁石
- ・着磁方向:径方向着磁
- ・表面処理:Niメッキ

カプセル仕様:

- ・材質:ステンレス

メールマガジン会員募集中

「メルマガ会員様だけ」に
いち早く最新サポート情報や、限定特典をお知らせします。

メルマガ登録は下記のメールアドレスへタイトル、本文なしの空メールを送るだけで登録完了

特典1

クマッキーのサポートや 会員様限定モニター情報

クマッキー製品サポート情報や会員様だけ募集の新製品無料モニター募集情報をいち早くお知らせします。

特典2

男性器増大鍛錬法や包茎 に関する情報を無償公開

有料販売している男性器増大鍛錬法やEDに関する情報や包茎に関する情報を無償提供しています。

reg@kumakkey.com

スマホの方は右記のQRコードからも登録出来ます



クマッキーアロマ商品に関するお問い合わせ、ご注文、ご質問、ご相談、ご意見等は、下記URLホームページのご購入者専用ページからアクセスするか、下記へ直接、Eメール、FAX、お手紙等でご連絡下さい。

(お断り)製品の価格・仕様等は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。



製造・販売元
株式会社アイ企画

TEL.048-481-9531
〒352-0011 埼玉県新座市野火止 5-2-13水野ビル 3階 FAX.048-481-9239
e-メール: webmaster@kumakkey.com ホームページ: http://www.kumakkey.com/